

Professional for you

ETHANOL AUS BIO-
LOGISCHER GÄRUNG

Flächendesinfektion



Professional for you Flächendesinfektion Alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel

- Parfümfrei
- Wirksam gegen Coronaviren
- Insbesondere für die Küche und den Haushalt geeignet

Produktbeschreibung

Professional for you Flächendesinfektion ist ein gebrauchsfertiges, alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Basis von Ethanol zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Das Produkt ist insbesondere für die Küche und den Haushalt geeignet. Neben einer wirksamen Desinfektion innerhalb kurzer Zeit, weist das Produkt eine gute Materialverträglichkeit auf.

Anwendungsgebiete

Gem. Biozidprodukte-Verordnung (BPR): Schnelldesinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar und Flächen aller Art, auch im Bereich von Küche und Haushalt.

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten

Anwendungsempfehlung zur Flächenwischdesinfektion:


bakterizid (EN 13727, EN 16615), levurozid (EN 13624, EN 16615):	2 min
tuberkulozid (EN 14348) (M. terrae):	1 min
mykobakterizid (EN 14348) (M. avium und M. terrae):	2 min
begrenzt viruzid (EN 14476):	1 min

Zur Flächendesinfektion ohne mechanische Wirkung:

bakterizid (EN 13727, EN 17387, EN 13697), levurozid (EN 13624, EN 17387, EN 13697):	2 min
tuberkulozid (EN 14348) (M. terrae):	1 min
mykobakterizid (EN 14348) (M. avium und M. terrae):	2 min
begrenzt viruzid* (EN 14476, EN 16777):	5 min

* Ergänzende Prüfergebnisse:

wirksam gegen Coronaviren:	30 s
----------------------------	------

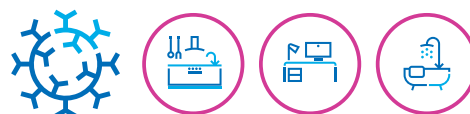

Anwendung

Die unverdünnte Lösung gleichmäßig auf alkoholbeständige Flächen aufbringen und diese über die Dauer der Einwirkzeit feucht halten. Sichtbare Verschmutzungen sind vor der Desinfektion zu entfernen.

Anwendungshinweise

Professional for you Flächendesinfektion kann als Wischdesinfektion oder Sprühapplikation (ohne Nachwischen) verwendet werden. Geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich. Die Lösung enthält Bio-Alkohol. VAH-gelistet unter DESCOSCEPT SENSITIVE.

Zusammensetzung

100 g Lösung enthalten: 45 g Ethanol.

Materialverträglichkeit

Die Anwendung wird bei folgenden Materialien nicht empfohlen: Polymethylmethacrylat (PMMA).

Sicherheits- und Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Dampf/Aerosol nicht einatmen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.

Produkt	Gebinde	Inhalt	VE	Art. Nr.	PZN
Professional for you Flächendesinfektion	Flasche	500 ml	20	00-323DS-005PY	19798354
	Sprühflasche	250 ml	30	00-323DS-0025PY	19638828

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BAuA Reg. Nr. N-114207

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Unter folgendem Link finden Sie unsere Zertifikate und Siegel:

<https://www.schumacher-online.com/de/zert>

Dr. Schumacher ist zertifiziert nach DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, BS OHSAS 18001, verfügt über ein validiertes Umweltmanagementsystem nach EMAS und ist Mitglied im IHO, VCI, BAH, DGSV und bei der DGKH.

Dr. Schumacher GmbH · Am Roggenfeld 3 · 34323 Malsfeld · Deutschland · T 05664 9496-0 · info@schumacher-online.com

www.schumacher-online.com